

THERMOMÈTRE FRONTAL

Surveillance de la température corporelle
sans contact

Surveillance rapide de la température corporelle sans contact

Simple d'utilisation, les thermomètres frontaux à cristaux liquides indiquent en un coup d'œil la température corporelle.

Lors de toute épidémie, la détection précoce de la fièvre aide non seulement à prévenir la propagation des maladies mais également à mettre en place un traitement beaucoup plus rapidement.

Accrédité par la FDA (US Food and Drug Administration), les thermomètres frontaux, basés sur la technologie de cristaux liquides, sont des outils de contrôle peu coûteux permettant de surveiller la température corporelle efficacement.



Simple d'utilisation

positionnement sur le front via
support adhésif



Contrôle rapide

de la température sans contact



Préventif

aide à prévenir la propagation des
maladies

Soutenus par des années de recherche et conçus pour une durée de conservation prolongée, ces thermomètres frontaux sont indispensables en cas de pandémie, de grippe ou d'urgence tout simplement.



TILT-IMPORT

tilt-import.com




Mesure préventive pour **lutter contre** l'épidémie du **COVID-19**


Prévention du COVID-19

Les thermomètres frontaux sont un moyen de surveiller la température corporelle afin de prendre des mesures préventives rapides. Vous pouvez obtenir une température précise en environ 15 secondes. Il s'agit simplement de regarder l'affichage à cristaux liquides jusqu'à ce que les couleurs sur la bandelette se stabilisent.

La prise de température est faite de façon non invasive, par simple positionnement sur le front via une étiquette adhésive. Les thermomètres frontaux sont idéaux pour une utilisation de masse comme par exemple pour des enfants, des centres de chirurgie, les travailleurs sur leur lieu de travail ou patients en quarantaine.

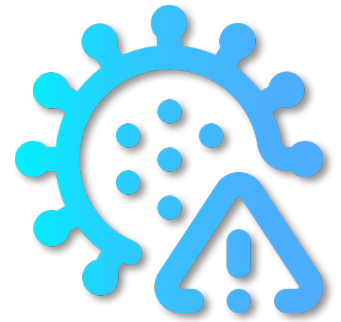

Dimensions

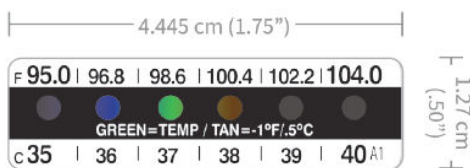

C-8786 – température frontale à double échelle de température

Température de réponse : 35°C/95°F, 36°C/96°F, 37°C/98°F, 38°C/100°F, 39°C/102°F, 40°C/104°F

Taille : 4,445 cm x 1,27 cm (1.75" x .50")

Application : usage unique, adhésif



C-8720 – température frontale à double échelle de température

Température de réponse: 435°C/95°F, 36°C/96°F, 37°C/98°F, 38°C/100°F, 39°C/102°F, 40°C/104°F

Taille : 7,1755 cm x 1,12 cm (2.825" x .44")

Application : réutilisable, adhésif repositionnable

Conseil d'utilisation : disponible numériquement par QR code



TILT-IMPORT

tilt-import.com



Test de la température **simple** et **rapide**

Spécifications techniques

Formats	Double échelle de température : Celsius et Fahrenheit
Tranche de température	De 95°F à 104°F et/ou de 35°C à 40°C
Précision	+/- 1,8°F / 1°C
Normes	FDA Class II Medical Device; Dispositif médical de Class I conformément au règlement EU 2017/745. Certification ISO 9001:2015
Durée de vie	2 ans
Options	Standard ou personnalisable
Conditionnement	Boîte de 100 ex ou rouleaux de 5000 ex avec perforation

Conseils d'utilisation

Les thermomètres doivent être utilisés à l'intérieur et à température ambiante.

Évitez la lumière directe du soleil ou une forte chaleur lorsque vous prenez la température. Ne prenez pas la température si la personne a mangé, bu ou fait de l'exercice au cours des 30 dernières minutes en raison de possibilité de fluctuation de température.

- 1- Retirer l'adhésif
- 2- Tenez le thermomètre aux deux extrémités et positionnez-le fermement sur le front sec pendant environ 15 secondes.
- 3- Lisez le thermomètre : **vert** = température correcte

Si vous ne voyez pas de couleur verte apparaitre, les zones peuvent se colorer en bleu (35 ou 36 °C) ou brun (38°C à 40°C).



TILT-IMPORT

Le contrôle du transport...la réduction des sinistres



+33 1 34 87 75 89



contact@tilt-import.com



ZI Saint Mathieu
5, rue des Garennes
F-78550 - HOUDAN



tilt-import.com